


# ТОРАЗ® HD / ТОРАЗ XL HD Панель Управления

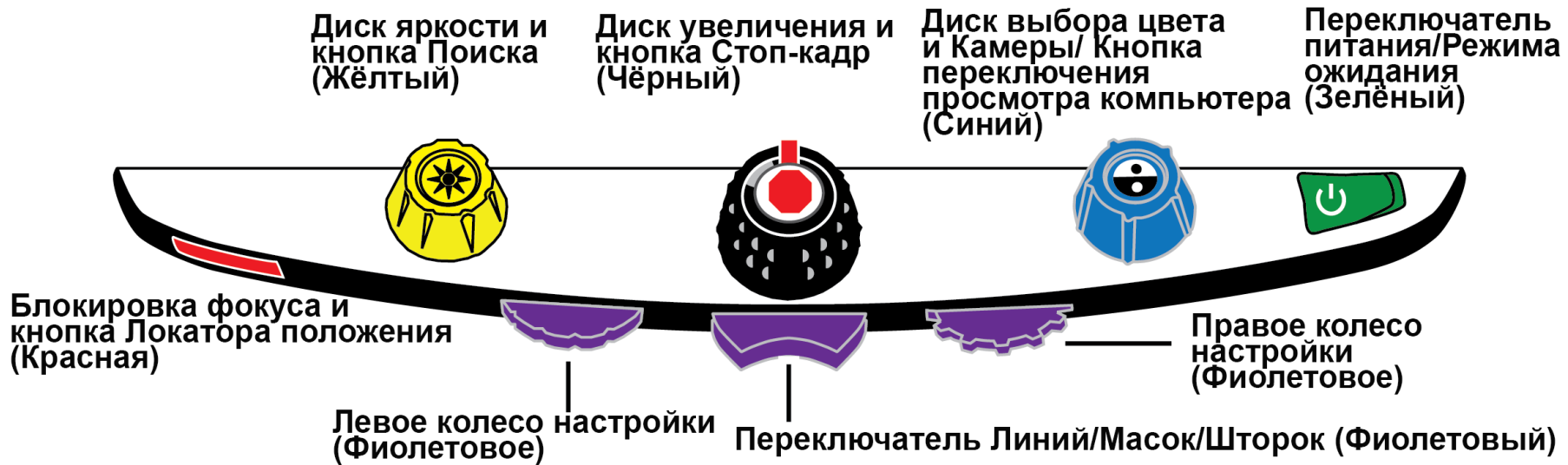

| Диск / Кнопка / Переключатель         | Назначение   |
|---------------------------------------|--|
| Диск яркости / Кнопка поиска (Жёлтый) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поворачивайте для увеличения или уменьшения яркости экрана</li> <li>• Нажмите и удерживайте центральную кнопку, чтобы уменьшить масштаб, используя функцию Поиска. Отпустите, чтобы увеличить.</li> </ul> |

| Диск / Кнопка / Переключатель   | Назначение  |
|---|---|
| Диск увеличения / Кнопка Стоп-кадр (Чёрный)                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поворачивайте для увеличения или уменьшения увеличения</li> <li>• Нажмите центральную кнопку, чтобы включить или выключить Стоп-кадр</li> </ul>  |
| Диск выбора цвета / Камера и Кнопка переключения просмотра компьютера (Синий) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поворачивайте, чтобы выбрать цветовой режим, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям по зрению</li> <li>• Если устройство подключено к компьютеру, нажмите центральную кнопку для переключения между компьютером и камерой устройства (только для TOPAZ XL HD)</li> <li>• Если устройство не подключено к компьютеру, нажмите центральную кнопку чтобы включить/выключить горизонтальную линию чтения (TOPAZ HD или TOPAZ XL HD)</li> </ul> |
| Переключатель питания/Режима ожидания (Зелёный)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите с правой стороны, чтобы перевести устройство в режим ожидания. Нажмите с левой стороны, чтобы включить устройство и вывести его из режима ожидания.</li> </ul>   |
| Кнопка Блокировки фокуса / Кнопка Локатора положения (Красная)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для TOPAZ HD, нажмите чтобы включить/выключить Блокировку фокуса</li> <li>• Для TOPAZ XL HD, нажмите чтобы включить Блокировку фокуса; нажмите ещё раз чтобы включить луч Локатора положения; нажмите в третий раз чтобы выключить и луч Локатора положения, и Блокировку фокуса</li> <li>• Нажмите и удерживайте одновременно с центральной кнопкой жёлтого Диска яркости, чтобы включить/выключить светодиодную подсветку для чтения</li> </ul>              |

| Диск / Кнопка / Переключатель                   | Назначение   |
|---|--|
| Переключатель линий, масок, шторок (Фиолетовый) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите вправо или влево, чтобы циклически изменять отображение на экране линий, масок или шторок горизонтально или вертикально</li> </ul>  |
| Левое колесо настройки (Фиолетовое)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поверните влево или вправо для перемещения обеих линий, масок или шторок на экране вверх и вниз или влево и вправо</li> </ul>   |
| Правое колесо настройки (Фиолетовое)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для горизонтальных линий, масок или шторок: поверните колесо для перемещения верхней линии, маски или шторки вверх или вниз. Это увеличивает или уменьшает расстояние между горизонтальными линиями, масками или шторками.</li> <li>• Для вертикальных линий, масок или шторок: поверните колесо, чтобы переместить правую линию, маску или шторку влево или вправо. Это увеличивает или уменьшает расстояние между вертикальными линиями, масками или шторками.</li> </ul> |

**Примечание:** Фиолетовый переключатель и колёса настройки находятся под пластиковой крышкой (не видны) под панелью управления.